

KONTAKTLINSEN-PFLEGE VON CIBAVISION.

Pflege für weiche Kontaktlinsen

AOSEPT PLUS



SOLOCARE AQUA



BLUE VISION



TITMUS H202+



AQUA TOUCH



Systemtyp	3%iges Wasserstoffperoxid - Neutralisation durch Platinkatalysator	All-in-One-Lösung	3%iges Wasserstoffperoxid - Neutralisation durch Tablette	3%iges Wasserstoffperoxid - Neutralisation durch separate Lösung	Systempflege für formstabile Kontaktlinsen
Besonderheit	- Doppelwirkformel: reinigt und desinfiziert - ohne Konservierungsstoffe	- Hohe Wasserbindung - schnelle Anwendung - antibakterieller MicroBlock™ Behälter	- Hohe Reinigungs- und Desinfektionsleistung durch Retardtablette - ohne Konservierungsstoffe	- Schnellstes Wasserstoffperoxid-System - ohne Konservierungsstoffe - mit Washer-Behälter	- Ausgezeichnete Reinigung und Desinfektion - antibakterieller MicroBlock™ Behälter
Komfort-Extras	Tiefenreinigung für lang anhaltenden Tragekomfort	Bewahrt die Feuchtigkeit für lang anhaltenden Tragekomfort durch Provitamin B5 und Sorbitol	Feuchtigkeitserhaltende Komfort-Pflege mit Eudragit und HPMC	Benetzung durch HPMC	Provitamin B5 und Sorbitol für gute Benetzung
Kompatibel mit Silikon-Hydrogelen	+++	++	+++	+	-
Inkl. Proteinentfernung	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja (auch AQUA TOUCH Tablet)
Anwendung*	- Linse im Körbchen 5 Sekunden mit AOSEPT PLUS abspülen: „Power-Dusche“ - selbsttätige Neutralisation (6 Stunden)	- Linse mit 3 Tropfen pro Seite 10 Sekunden reiben 10 Sekunden abspülen, dann mindestens 5 Minuten einlagern	- Linse in BLUE VISION Lösung plus Tablette einlagern - Selbsttätige Neutralisation (6 Stunden) - Blauindikator beachten	2 Stunden Einlagerung in Lösung 1 20 Minuten Neutralisation in Lösung 2	- Linse mit 10 Tropfen Reiniger 30 Sekunden reiben - Gründlich mit Aufbewahrungslösung abspülen, dann mindestens 1 Minute einlagern
Abreiben erforderlich	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Mindest-Einlagerungszeit	6 Stunden	5 Minuten	6 Stunden	2 Stunden (in Lösung 1) 20 Minuten (in Lösung 2)	1 Minute
Maximale Einlagerungszeit	14 Tage	30 Tage	14 Tage	30 Tage (in Lösung 1) 2 Stunden (in Lösung 2)	30 Tage

Zusatzprodukte

SoftWear Saline

- Konservierungsmittel-freie Keuch-Lösung
- Hervorragende Ergänzung für Wasserstoffperoxid-Systeme
- Ideale Abspül-Lösung für alle Kontaktlinsen und Behälter



Unizyme

- Universelle Proteinentfernungstablette
- Für alle Kontaktlinsen



Miraflow

- 3-fach aktiver Reiniger mit hoher Desinfektionsleistung und Reinigungswirkung auf Alkoholbasis
- Für alle Kontaktlinsen



Aquity

- Hihtech-Nachbenetzungs-Lösung mit Hyaluronsäure
- ohne Konservierungsstoffe
- auch für Nicht-Kontaktlinsesträger



WELCHE PFLEGE ZU WELCHER LINSE? – EIN EMPFEHLUNGS-LEITFADEN.



	Pflegeprodukte					Zusatzprodukte			
	Für weiche Kontaktlinsen			Für harte Kontaktlinsen		Reinigt / Spült	Reinigt / Spült / Lagert	Reinigt / Spült / Lagert / Lagert	Reinigt / Spült / Lagert
	ARTISTIC PLUS	HYDRACARE MEGA	BLAU MEGA	TRIVIAL-SPRÜH	WISSA TRIVIAL	Softlens® Spülen	Spülen	Lagern	Artivity
	+++	++	+++	+	+	+++	++	+	++
	+	+	+	+	+	+	+	+	+++
Reinigt / Spült / Lagert / Lagert	++	+++	++	++	+	+++	+	+	+++
Reinigt / Spült / Lagert / Lagert	+++	++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++
Reinigt / Spült / Lagert / Lagert	++	+	+	+	+++	+++	+++	+++	+++

Reinigt / Spült / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert

Reinigt / Spült / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert / Lagert

TIPPS FÜR KONTAKTLINSEN-TRAGENDER:

- Bei jeder Handhabung immer die Hände waschen
- Pflegeprodukte immer gemäß Anleitung anwenden
- Kontaktlinsen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt einlegen / tragen
- Kontaktlinsen immer korrekt einlegen / tragen
- Kontaktlinsen immer vorsichtig auslegen / tragen
- Kontaktlinsen gemäß der Empfehlung des Herstellers einlegen / tragen
- Kontaktlinsen immer vorsichtig auslegen / tragen

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel



Optix
Dailies
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel

Optix
Dailies
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel