

Die neue multifokale
wöhlk MULTI FEN



wöhlk
CONTACTLINSEN

Die erste Contactlinse
mit FEN Vision Technology

Hergestellt in
Deutschland

Passt schnell & einfach.

Die neue multifokale **wöhlk MULTI FEN**

Unser Expertenteam hat eine neue
Technologie entwickelt.

Diese Technologie bietet Ihnen ganz
neue Möglichkeiten, Contactlinsen
schnell & einfach anzupassen.

F **E** **N** Vision Technology
Fast Easy Natural Vision

SCHNELL & EINFACH → FAST & EASY

FEN Vision Technology

→ Die **FEN** Vision Technology basiert auf weiterentwickelten und speziell aufeinander abgestimmten Flächenprofilen der Contactlinse.

Das Ergebnis: Ein natürliches Sehen in allen Entfernungen und eine schnelle Gewöhnung an die Contactlinse.

→ Die **FEN** Vision Technology ist die spezielle Abstimmung der Flächenprofile zusammen mit der einfachen Anpassung der Contactlinse.

→ Unterstützt wird die **FEN** Vision Technology durch die gezielte Verwendung von **wöhlk** Materialien mit hohem Transmissionsgrad. Absorptionseffekte werden reduziert und ein natürlicher Seheindruck entsteht.

Anpassleitfaden

wöhlk MULTI **FEN**

Wir empfehlen die Erstanpassung mit Diagnoselinsen. Diese weisen Funktionsgravuren zum Abschätzen der Zentrierung auf und müssen nicht zurückgeschickt werden.

Lieferbare Parameter

Lieferbar auch in den Varianten VPT/RT/BT

Anpasswert	0,40/0,60
Durchmesser [mm]	9,3/9,8/10,3
Basiskurve [mm]	6,00 bis 9,00 (0,05)
Basiskurve [mm] (RT/BT)	flacher HS: 6,50 bis 9,50 (0,05) steiler HS: 6,00 bis 9,00 (0,05)
Sphäre [dpt]	-25,00 bis +25,00 (0,25)
Zylinder [dpt] (BT/VPT)	-0,50 bis -4,00 (0,25)
Achse [°] (BT/VPT)	1 bis 180 (1)

FEN Profil A → **FEN** Profil B → **FEN** Profil C

Wahl der Basiskurve und des Durchmessers

Anpasswert CL	0,4			0,6			
HH-EXZ	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Korrekturwert der Basiskurve CL [mm]	-0,10	-0,05	0,00	-0,05	0,00	+0,05	+0,10

Hornhautdurchmesser [mm]	11,0 bis 11,5	11,6 bis 12,0	> 12,0
Durchmesser CL [mm]	9,30	9,80	10,30

Bei Hornhautradiendifferenzen bis ca. 0,3 mm → erfolgt die Anpassung parallel zum flachen Hornhautmeridian unter Berücksichtigung des Korrekturwertes, wenn die Hornhautexzentrizität vom Anpasswert der Contactlinse abweicht.

Ist die Hornhautexzentrizität nicht bekannt, wird die Contactlinse mit Anpasswert 0,6 gewählt. Die Basiskurve wird dann um 0,05 mm steiler bestellt als der flache Hornhautmeridian.

Bei Hornhautradiendifferenzen > 0,3 mm und nicht zufriedenstellendem Sitzverhalten einer rotationssymmetrischen Contactlinse, sollte die rücktorische Variante angepasst werden und die endgültige Contactlinsenstärke durch eine Zusatzrefraktion bestimmt werden.

Wahl des Stärkenprofils

Start	FEN Profil A
Verbesserung der Nähe	FEN Profil B
Weitere Verbesserung der Nähe	FEN Profil C
Weitere Individualisierung	wöhlk MULTI*

Bei Addition >2,00 dpt und Anpasswert 0,4 empfehlen wir, mit Profil B zu starten.

Wahl von Extras

Die **wöhlk** MULTI **FEN** kann optional mit einem Prisma versehen werden. Das Prisma wird bei unruhigem Bewegungsverhalten und bei tendenziell hochsitzenden Contactlinsen empfohlen.

* Für eine weitere Individualisierung Ihrer Anpassung steht Ihnen wie gewohnt das komplette Geometriespektrum der **wöhlk** MULTI zur Verfügung. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Anpassberatung unter der Tel.: +49 (0) 431 991-18 88



Florian Ruch, Augenoptikermeister
und Kontaktlinsenspezialist
Optik Viehoff, Münster

„Wir freuen uns, dass wir die Entwicklung der neuen Technologie begleiten durften. Das Feedback der Kunden ist durchweg positiv, sie berichten von einem natürlichen Sehen gleich von Beginn an. Die neue Technologie ist deutlich weicher und führt – insbesondere bei Gleitsicht-Neueinsteigern – zu einer schnellen Gewöhnung an die Contactlinse.“

Vorteile der **wöhlk MULTI FEN**:

- ✓ Einfachste Anpassung durch unkomplizierte Parameterauswahl
- ✓ Gereinigte und hydrophile Oberfläche dank oxidativem Plasmaprozess
- ✓ gute Benetzbarkeit
- ✓ hoher initialer Tragekomfort
- ✓ Natürliches Sehen in allen Entfernungen
- ✓ Schneller Anpasserfolg



Stefan Schwarz FAAO
Optometrist/MCOptom
Optometrie Schwarz, Hildesheim

wöhlk MULTI FEN 

“Selten habe ich bei multifokalen formstabilen Contactlinsen schon bei der ersten Anpassung so begeisterte Kunden erlebt.”



wöhlk
CONTACTLINSEN

wöhlk Contactlinsen GmbH

Anschrift:

Bürgermeister-Schade-Str. 12-16
DE - 24232 Schönkirchen

Servicezeiten:

Mo - Fr. 9:30 - 17:00Uhr

Servicenummern:

Telefon	+49 (0) 431 991-17 77
Fax	+49 (0) 431 991-15 55
Anpassberatung	+49 (0) 431 991-18 88
Seminar	+49 (0) 431 991-10 52

Service online:

Email	bestellung@woehlk.com
Anpassberatung	topo@woehlk.com
Internet	woehlk.com